



MAGINON

Bedienungsanleitung


SMD-1

Smarter Medikamentenspender



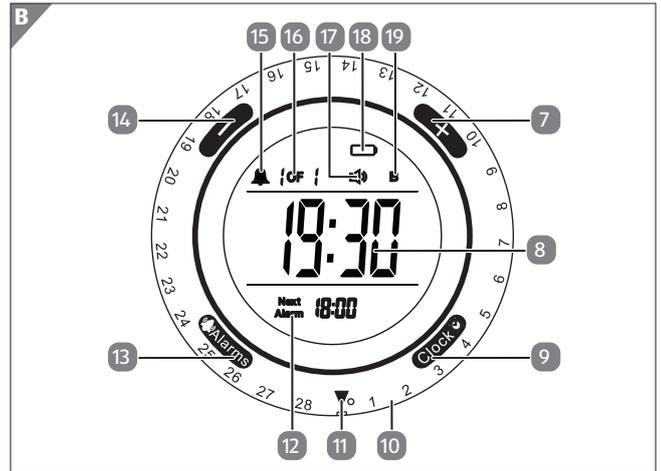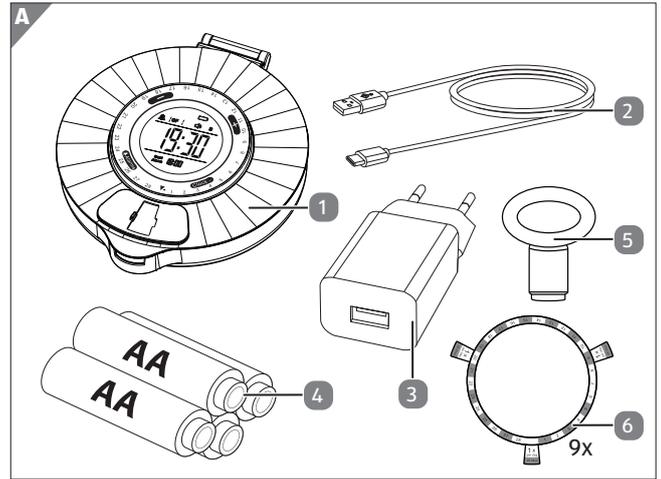

MAGINON

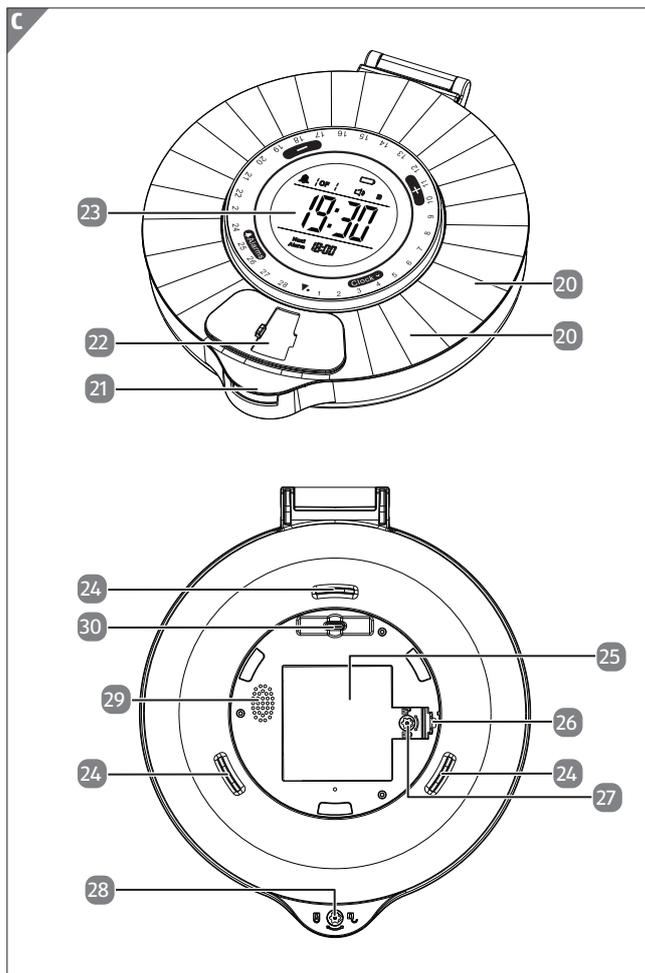

Lieferumfang/Geräteteile

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 SMD-1 Smarter Medikamentenspender | 16 Anzeige Alarme pro Tag |
| 2 USB-C Kabel | 17 Lautstärke Anzeige |
| 3 USB-Netzadapter | 18 Batteriestatus |
| 4 4x AA Batterien | 19 Alarmton Anzeige |
| 5 Schlüssel | 20 Medikamentenfächer |
| 6 Dosierungsringe | 21 Öffner Medikamentenspender |
| 7 + Taste | 22 Deckel Ausgabefach |
| 8 Uhrzeit | 23 Display |
| 9 Clock Taste (Uhreinstellung) | 24 Standfuß |
| 10 Bedien- und Orientierungsfläche | 25 Batteriefachabdeckung |
| 11 Markierung Startpunkt | 26 Batteriefachverschluss |
| 12 Anzeige „Nächster Alarm“ | 27 Batteriefachschloss |
| 13 Alarm Taste (Alarmeinstellung) | 28 Schloss für Medikamentenfächer |
| 14 - Taste | 29 Lautsprecher |
| 15 Alarm Aktiv Anzeige | 30 USB-Anschluss |

Inhaltsverzeichnis

Überblick	3
Lieferumfang/Geräteteile	5
Vorwort	7
Allgemeines	8
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	8
Zeichenerklärung	9
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	11
Sicherheit	12
Sicherheitshinweise	12
Inbetriebnahme	19
Verpackungsinhalt	19
Medikamentenspender anschließen	20
Batterien einlegen	20
Reinigung	32
Aufbewahrung	33
Technische Daten	33
Hinweise zur EU-Konformitätserklärung	34
Entsorgung	34
Verpackung entsorgen	34

Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines qualitativ hochwertigen MAGINON Produktes.

Sie haben einen modernen Medikamentenspender mit hervorragender technischer Ausstattung erworben, welcher besonders einfach zu bedienen ist.

Das Produkt wird mit einer 3-Jahres-Garantie ausgeliefert. Bei einem Defekt des Produktes benötigen Sie die beiliegende Garantiekarte und den Kaufbeleg. Bitte bewahren Sie beides an einem sicheren Ort auf.

Impressum

Ausgestellt durch:

supra Foto-Elektronik-Vertriebs GmbH
Denisstr. 28 A, 67663 Kaiserslautern, Deutschland

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Smarten Medikamentenspender SMD-1 (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme, Handhabung und Entsorgung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Datenverlust oder Schäden an dem Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



GEFAHR!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol bietet Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Montage oder Bedienung.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle maßgeblichen Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Produkte werden mit Gleichstrom betrieben.



Produkte, die dieses Symbol tragen, werden mit Wechselstrom betrieben.



Nur für innen. Geräte mit diesem Zeichen dürfen nur im Haus betrieben werden. (trockene Umgebung).



Geräte mit diesem Zeichen haben eine zusätzliche oder verstärkte Isolierung und entsprechen der Schutzklasse II.



Das Gerät entspricht der Schutzklasse III. Es verfügt über eine geringe Spannung und sichere Trennung zu anderen Stromkreisen.



Dieses Symbol bedeutet, dass der Adapter die Energiestandards der Stufe VI erfüllt, was minimalen Stromverbrauch während der Nutzung und im Leerlauf gewährleistet.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Erinnern der Einnahme an Medikamenten, Vitaminen und andere Ernährungstabletten konzipiert. Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Sie dürfen das Produkt nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben verwenden. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch und kann Sachschäden und Datenverlust verursachen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind, und für unerlaubte Veränderungen.

Verwenden Sie den mitgelieferten Netzadapter ausschließlich mit diesem Produkt. Wenn Sie das Produkt entsorgen, stellen Sie die gleichzeitige Entsorgung des Netzadapters sicher.

Sicherheit

Sicherheitshinweise

ACHTUNG!

Gefahr durch elektrischen Strom!

Fehlerhafte elektrische Installationen oder eine übermäßige Netzspannung können Stromschlag verursachen.

- Schließen Sie das Produkt nur dann an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Das Produkt an eine leicht zugängliche Steckdose anschließen, damit Sie das Produkt bei Problemen schnell vom Netz trennen können.
- Nur den mitgelieferten Netzadapter benutzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist oder wenn das Kabel oder der Netzadapter defekt sind.
- Wenn das Produkt oder das Zubehör beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht bzw. repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gehäuse darf nicht geöffnet und Reparaturen dürfen ausschließlich von einem Fachmann ausgeführt werden. Wenden Sie sich hierzu an eine Fachwerkstatt. Bei Reparaturen durch den Benutzer, unsachgemäßem Anschluss oder Fehlbedienung werden jegliche Haftung und alle Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.

- Das Produkt darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernsteuerungssystem benutzen.
- Das Produkt oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen Händen.
- Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, z. B. Kerzen, oder Gegenstände mit Flüssigkeit gefüllt, z.B. eine Vase, auf das Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt nur in tropischem und / oder gemäßigttem Klima.
- Bei Problemen des Produkts aufgrund statischer Entladungen, schalten Sie das Gerät aus und nach etwa 10 Sekunden wieder ein.

ACHTUNG!

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (z. B. teilweise Behinderte, ältere Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten) oder mangelnder Erfahrung und Know-how (z. B. ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Know-how benutzt werden, sofern diese beaufsichtigt werden oder eine Anleitung zur sicheren Verwendung des Produkts erhalten haben und die sich aus dem Gebrauch entstehenden möglichen Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Produkt nicht spielen. Das Produkt darf von Kindern nicht gereinigt oder gepflegt werden. Halten Sie Kinder unter acht Jahren vom Produkt und dem Netzkabel fern.

- Stecken Sie keine Gegenstände in das Produkt.
- Das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Halten Sie Batterien von Kindern und Haustieren fern.
- Wenn Sie vermuten, das ihr Kind eine Batterie verschluckt hat sofort ärztliche Hilfe suchen.

HINWEIS!

Gefahr von Sachschaden!

Durch unsachgemäße Verwendung kann das Produkt beschädigt werden.

- Der Netzadapter ist nicht gegen Schäden durch Strahl- oder Spritzwasser geschützt.
- Entfernen Sie den Netzadapter niemals durch Ziehen an dem Netzkabel aus der Steckdose, ziehen Sie stets am Netzadapter.
- Niemals das Netzkabel als Tragegriff benutzen.
- Halten Sie Produkt und Netzadapter von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Das Produkt nie so aufbewahren, dass er in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen könnte.
- Niemals ein elektrisches Gerät berühren, welches ins Wasser gefallen ist. In solchen Umständen immer sofort den Netzadapter aus der Steckdose ziehen.

- Wenn Sie das Produkt länger nicht benutzen oder wenn eine Produktstörung auftritt, das Produkt unbedingt ausschalten.
- Bei Installation und Montage des Produkts darauf achten, dass ein Abstand von 10 cm zu allen Seiten beibehalten wird, um so für eine ausreichende Belüftung zu sorgen. Achten Sie insbesondere darauf, dass das Produkt nicht durch Zeitungen, Tischdecken oder Vorhänge abgedeckt wird.
- Das Produkt auf einer leicht zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und hinreichend stabilen Arbeitsfläche aufstellen. Das Produkt nicht an der Kante oder am Rand einer Arbeitsfläche abstellen.
- Vermeiden Sie eine Überhitzung, indem Sie das Produkt niemals direkt an einer Wand oder unter einem Hängeschrank aufstellen.
- Das Produkt niemals auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen abstellen (z.B. Herdplatten, usw.).
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung kommt.
- Setzen Sie das Produkt nicht zu hohen Temperaturen aus (z.B. Heizungswärme). Gießen Sie niemals Flüssigkeiten in das Produkt.
- Das Produkt zur Reinigung nicht in Wasser eintauchen und keinen Dampfreiniger verwenden. Das Produkt könnte ansonsten beschädigt werden.
- Das Produkt nicht benutzen, wenn sich an Bauteilen Risse oder Sprünge zeigen oder sich Bauteile verformen. Beschädigte Teile nur durch Original-Ersatzteile ersetzen.
- Eine Beschädigung der Elektronik oder von Zubehörteilen durch externe Einflüsse wie Schlag, Herabfallen oder sonstige Einwirkungen fallen nicht unter die Garantie und

eine Reparatur ist kostenpflichtig.

- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht bei extrem niedrigem Luftdruck. Dies kann zu einer Explosion oder dem Austritt von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.

WARNUNG!

Explosionsgefahr!

Bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien oder wenn diese durch einen falschen Typ ersetzt werden. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.

- Folgen Sie den vom Batteriehersteller angegebenen Sicherheits-, Verbrauchs-, und Entsorgungs-Anweisungen.
- Entfernen Sie alte oder entladene Batterien aus dem Produkt. Alle Batterien eines Satzes gleichzeitig wechseln.
- Batteriekontakte und auch die Kontakte in dem Produkt vor dem Einlegen der Batterien reinigen.
- Beachten sie beim Einlegen der Batterien, die richtige Polarität (+/-) . Wenn die Polarität nicht beachtet wird kann es zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
- Batterien, die ausgelaufen sind, niemals ohne entsprechenden Schutz anfassen. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.
- Vermeiden Sie Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, um Schäden aufgrund verrosteter

oder korrodierter Batterien zu verhindern.

- Werfen Sie nie Batterien in ein Feuer. Setzen Sie Batterien nicht Feuer oder anderen Wärmequellen (z.B. heißer Ofen) aus.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, ihn reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus. Entfernen sie die Batterien und trennen Sie alle Verbindungen.
- Setzen Sie die Batterien nie extrem hohen Temperaturen aus. Dies kann zu einer Explosion oder zum Austritt von entflammbarer Flüssigkeit oder Gasen führen.
- Setzen Sie die Batterien und das Produkt nie extrem niedrigen Luftdruck aus. Es kann beim Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas zu einer Explosion kommen.
- Batterie- und Akkuentsorgung: Alte oder entladene Batterien und Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt oder recycelt werden in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetze. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung für Abfälle.
- Vor der Entsorgung, müssen Batterien zuerst entfernt und separat vom Produkt entsorgt werden.
- Versuchen sie niemals, Batterien wieder aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Niemals verschiedene Batterietypen gleichzeitig verwenden.
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen neu aufgeladen werden.
- Sollten Sie wiederaufladbare Batterien aufladen wollen, entnehmen Sie die Batterien zunächst aus dem Produkt.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.

- Batteriekontakte des Produkt niemals kurzschließen.
- Quetschen oder schneiden Sie nie Batterien.
- Sie sollten die Batterien unter keinen Umständen auseinandernehmen, zerstören, durchlöchern oder kurzschließen. Es besteht Explosionsgefahr.
- Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt



Erstickungsgefahr!

Halten Sie Kunststofffolien und Kunststofftaschen von Säuglingen und Kleinkindern fern, da Erstickungsgefahr besteht.

HINWEIS!

Gefahr von Sachschäden!

Wird die Verpackung unachtsam mit einem scharfen Messer oder einem anderen spitzen Gegenstand geöffnet, kann das Produkt beschädigt werden.

1. Verpackung vorsichtig öffnen.
2. Verpackungsmaterial und alle Schutzfolien entfernen.
3. Lieferumfang auf Vollständigkeit prüfen (siehe **Abb. A**).
4. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und prüfen Sie, ob das Produkt selbst, Zubehör oder eines seiner Bauteile beschädigt ist. Sollte dies der Fall sein, das Produkt nicht benutzen. Kontaktieren Sie den Service des Herstellers.

Medikamentenspender anschließen

Das Produkt wird mit dem mitgelieferten USB-C Kabel [2] und USB-Netzadapter [3] betrieben, oder durch 4 Batterien [4].

Um das Produkt mit Strom zu versorgen verbinden Sie das USB-C Kabel [2] mit dem USB-Anschluss [30] auf der Unterseite des Medikamentenspenders und mit dem USB-Netzadapter [4]. Stecken Sie den USB-Netzadapter [4] in eine geeignete, frei zugängliche Steckdose. Achten Sie darauf, dass das USB-C Kabel [2] nicht zur Stolperfalle wird.

ACHTUNG!

Gefahr durch elektrischen Strom!

Vor Verwendung des Produkts folgendes beachten:

Kontrollieren Sie, dass die Netzfrequenz mit der des Produkts übereinstimmt. Nicht mit nassen Händen am Netzadapter ziehen oder das Produkt ausstöpseln.

HINWEIS!

Netzadapter aus der Steckdose und aus dem Produkt ziehen, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Batterien einlegen

Batterien dienen in der Regel dazu, die Funktion des Medikamentenspenders [1] bei Stromausfall aufrecht zu erhalten. Der Medikamentenspender [1] kann aber auch nur mit Batterien [4] genutzt werden. Zum Einlegen der Batterien [4] öffnen Sie zunächst die Batteriefachabdeckung [25] mit dem beiliegenden Schlüssel [5] und ziehen den Batteriefachverschluss [26] leicht zur Mitte des Medikamentenspenders [1]. Nehmen Sie die

Batteriefachabdeckung [25] ab und nehmen Sie zunächst eventuell vorhandene Batterien aus dem Batteriefach heraus. Setzen Sie 4 volle Batterien ein. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität der Batterien, die im Batteriefach für jede Batterie markiert ist. Setzen Sie danach die Batteriefachabdeckung [25] wieder auf das Batteriefach und verschließen Sie es mit dem Schlüssel [5].

Batterien müssen ausgetauscht werden, wenn im Display [2] die Batterieanzeige [18] einen niedrigen Batterieladelevel anzeigt.

Medikamentenspender vorbereiten

Öffnen Sie zunächst das Schloss für die Medikamentenfächer [27] auf der Unterseite des Gerätes mit dem mitgelieferten Schlüssel [5]. Danach können Sie die Abdeckung der Medikamentenfächer nach oben klappen.

Jetzt liegt die Bedien- und Orientierungsfläche [10] sowie die Medikamentenfächer [20] frei vor Ihnen. Sie können jetzt die Dosierungsringe [6] einlegen, die Uhrzeit, die Alarmzeit, sowie den Alarmton und die Alarmlautstärke einstellen, sowie am Ende die Medikamente auffüllen.

Dosierungsringe

Folgende Dosierungsringe [6] liegen bei:

1x pro Tag, 28 Tage:

Legen Sie diesen Dosierungsring ein, wenn Sie einmal am Tag Tabletten einnehmen müssen. Sie können Tabletten für 28 Tage in den Medikamentenspender einlegen.

2 x pro Tag, 14 Tage:

Müssen Sie zu zwei bestimmten Uhrzeiten Tabletten einnehmen, können Sie mit diesem Ring Medikamente für 14 Tage einlegen.

3 x pro Tag, 9 Tage:

Bei 3 Einnahmen am Tag werden 9 Tage vorbereitet.

4x pro Tag, 7 Tage:

Bei 4 Einnahmen am Tag werden 7 Tage vorbereitet.

5 x pro Tag, 5 Tage:

Bei 5 Einnahmen am Tag werden 5 Tage vorbereitet.

6 x pro Tag, 4 Tage:

Bei 6 Einnahmen am Tag werden 4 Tage vorbereitet.

7 x pro Tag, 4 Tage:

Bei 7 Einnahmen am Tag werden 4 Tage vorbereitet.

8 x pro Tag, 3 Tage:

Bei 8 Einnahmen am Tag werden 3 Tage vorbereitet.

9 x pro Tag, 3 Tage:

Bei 9 Einnahmen am Tag werden 3 Tage vorbereitet

Wählen Sie den entsprechenden Dosierungsring [6] und legen Sie ihn in so in den geöffneten Medikamentenspender [1], dass der schwarze Pfeil auf rotem Grund auf dem Dosierungsring [6] direkt unter dem schwarzen Pfeil der Markierung Start [11] auf dem Bedien- und Orientierungsfeld [10] liegt.

Die rot markierten Felder auf den Dosierungsringen [6] zeigen die Medikamentenfächer an, die nicht befüllt werden dürfen!

Uhrzeit einstellen

Stellen Sie die Uhrzeit auf dem Display [23] des Medikamentenspenders [1] ein:

12 oder 24 Stunden Modus wählen:

Drücken Sie die Clock Taste [9] für 2 Sekunden. Sie wechseln hiermit zwischen dem 12 und 24 Stunden Modus. Erscheint rechts neben der Uhrzeit [8] „AM“ oder „PM“, befinden Sie sich im 12 Stunden Modus. Drücken Sie die Clock Taste [9] erneut für 2 Sekunden, wird rechts neben der Uhrzeit [8] nichts angezeigt und Sie befinden sich im 24 Stunden Modus.

Hinweis: Der gewählte Stundenmodus wird in die App übernommen, daher hier schon den von Ihnen gewünschten Modus einstellen.

Aktuelle Uhrzeit einstellen:

1. Drücken Sie die Clock Taste [9] einmal kurz.
2. Die Stundenanzeige blinkt. Stellen Sie nun mit den Tasten „+“ und „-“ [7] / [14] die korrekte Stunde ein. Drücken Sie dann die Clock Taste [9] erneut.
3. Die Minutenanzeige blinkt. Stellen Sie nun mit den Tasten „+“ und „-“ [7] / [14] die korrekte Minute ein. Drücken Sie die Clock Taste [9] erneut, um die Zeit zu speichern und den Einstellmodus zu verlassen.

Hinweis:

- Wenn Sie bei der Stunden- und Minuteneinstellung die + und - Taste [7] / [14] gedrückt halten, bewegt sich die Stunden- und Minutenanzeige schneller.
- Halten Sie die Clock Taste [9] für 2 Sekunden, um die aktuelle Einstellung ohne zu speichern abzubrechen.

Alarm einstellen

Geben Sie die Uhrzeit der Medikamentenausgabe ein und wählen Sie den Alarmton, der zur Ausgabezeit ertönen soll. Achten Sie darauf die folgenden Schritte zügig durchzuführen, solange sich das Display [23] in den Alarmeinstellungen befindet.

Alarmzeit einstellen:

1. Drücken Sie die Alarm Taste [13] um die Einstellung zu beginnen. Das Display [23] wechselt in den Alarmeinstellungsmodus.
2. Die Anzeige Alarm pro Tag [16] links oben im Display [23] steht auf „1 of 9“ für bis zu 9 Alarme (Medikamenteneinnahmen) am Tag.

Mit den Tasten + und - [7] / [14] können Sie weitere Alarmzeiten anwählen. Zur Eingabe des ersten Alarms bleiben Sie aber auf der Einstellung 1 of 9.

3. Um den ersten Alarm einzustellen, drücken Sie die Taste Alarm [13] erneut. Die Stundenanzeige für den Alarm beginnt zu blinken.

4. Wählen Sie mit den Tasten + und - [7] / [14] die Stunde an, in der ein Alarm ertönen soll.

5. Drücken Sie die Taste Alarm [13] erneut, die Minutenanzeige beginnt zu blinken.

6. Wählen Sie mit den Tasten + und - [7] / [14] die Minute an, in der ein Alarm ertönen soll.

7. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Alarm Taste [13]. Der Alarm für die erste Medikamenteneinnahme ist gespeichert.

Müssen an einem Tag mehrfach Medikamente eingenommen werden, wiederholen Sie die Eingabe der Alarmzeit. Wählen Sie als nächsten Alarm die Einstellung 2 of 9, für den dritten Alarm am Tag die Einstellung 3 of 9. Sie können bis zu 9 Alarmer (9 of 9) am Tag einstellen.

Hinweis:

Eingegebene Alarmer können Sie durch einmaliges drücken der Alarm Taste [13] speichern.

Um den Vorgang der Alarmeringabe ohne zu speichern abubrechen, warten Sie ein paar Sekunden, bis sich der Modus Alarmerinstellungen automatisch abschaltet.

Alarmton auswählen:

Drücken Sie die Alarm Taste [13] jeweils für 3 Sekunden, um zwischen den Alarmen A, B und C zu wählen. Die Alarmton Anzeige [19] im Display [23] zeigt Ihnen den angewählten Alarm rechts oben an.

Alarm A: Eine Sprachausgabe mit einem 20 Sekunden langen Alarmton ertönt mit einer Wiederholung alle 10 Sekunden.

Alarm B: Eine Sprachausgabe mit 3 x 3 Alarmtönen, die sich nach 7 Sekunden Pause wiederholen.

Alarm C: Eine Sprachausgabe mit einem Alarmton ertönt mit einer Wiederholung alle 3 Sekunden.

Alarm Lautstärke einstellen:

Drücken Sie die - Taste [14] jeweils für 3 Sekunden, um zwischen den 3 verschiedenen Lautstärken zu wählen. Die Lautstärke Anzeige [17] Anzeige im Display [23] zeigt Ihnen die angewählte Lautstärke an, eine Sprachausgabe und ein Alarm demonstrieren zusätzlich die gewählte Lautstärke. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie die gewünschte Lautstärke eingestellt haben.

Hinweis:

Der eingestellte Alarm ertönt zu den eingestellten Alarmzeiten. Um das Bedien- und Orientierungsfeld [10] blinkt zusätzlich eine blaue LED. Werden die Medikamente verspätet eingenommen, leuchtet die LED rot.

Wird ein Alarm ausgelöst, wiederholt sich dieser, bis der Medikamentenspender [1] angehoben und die Tabletten entnommen wurden.

WiFi aktivieren

Um den Medikamentenspender [1] mit der App zu verbinden und einzurichten, muss eine WiFi Verbindung zu Ihrem Smartphone aufgebaut werden. Um das WiFi am Medikamentenspender zu aktivieren, drücken Sie die + Taste [7] am Gerät für 3 Sekunden. Es folgt eine Sprachausgabe „AP-Mode“, das WiFi-Symbol im Display erscheint und der LED Ring um die Bedien- und Orientierungsfläche [10] blinkt blau.

Alarmerinstellungen und viele andere Einstellungen können Sie

auch direkt über die App durchführen.

Hinweis: Die WiFi-Verbindung zum Smartphone wird direkt über die App aufgebaut und nicht über die Einstellung „Verbindungen“ am Smartphone.

Medikamente einlegen

Sie haben den korrekten Dosierungsring [6] eingelegt und alle Termine zur Medikamenteneinnahme in dem Gerät hinterlegt. Befüllen Sie nun die Medikamentenfächer [20] mit den entsprechenden Medikamenten. Schließen Sie danach die Abdeckung der Medikamentenfächer [13] und verschließen Sie das Schloss für die Medikamentenfächer [28] auf der Unterseite des Gerätes.

iDispenser App installieren und nutzen

Sie können den Medikamentenspender via WiFi mit Ihrem Smartphone verbinden. Laden Sie hierzu die App „iDispenser“ Go“ aus dem App Store herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone.




iOS



Android


Öffnen Sie die App und registrieren Sie einen neuen Account anhand Ihrer Emailadresse. Sie erhalten einen Code via Email. Geben Sie den Code in der App ein und legen Sie ein Passwort fest. Notieren Sie sich das Passwort. Sie können sich jetzt in die App einloggen.

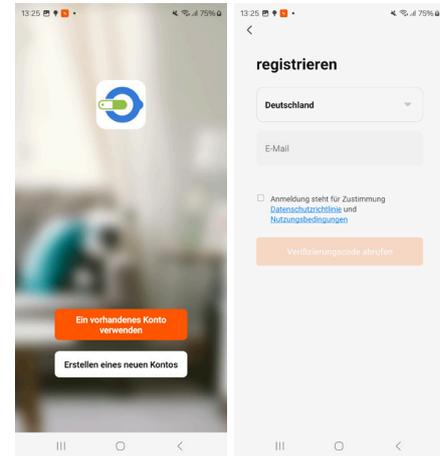

Aktivieren Sie das WiFi an Ihrem Medikamentenspender, indem Sie die + Taste [7] für 2 Sekunden gedrückt halten. Es ertönt eine Sprachausgabe und der LED Ring um das Bedien- und Orientierungsfeld [10] blinkt blau. Das WiFi bleibt 3 Minuten zum Verbinden mit der App aktiviert.

Klicken Sie nun das + Symbol auf dem App-Bildschirm rechts oben an, um den Medikamentenspender [1] zu verbinden.

Nach wenigen Sekunden wird Ihnen der Medikamentenspender als „P20 5G Pill Dispenser“ angeboten. Klicken Sie auf „Hinzufügen“. Es folgt die Abfrage des WiFi Netzwerkes, mit dem Ihr Smartphone verbunden ist und in dem der Medikamentenspender installiert werden soll. Geben Sie das entsprechende WiFi-Passwort ein und klicken Sie auf „Weiter“. Der Medikamentenspender wird nun mit der App verbunden. Am Gerät erfolgt eine Sprachausgabe. Klicken Sie in der App auf „Fertigstellung“.

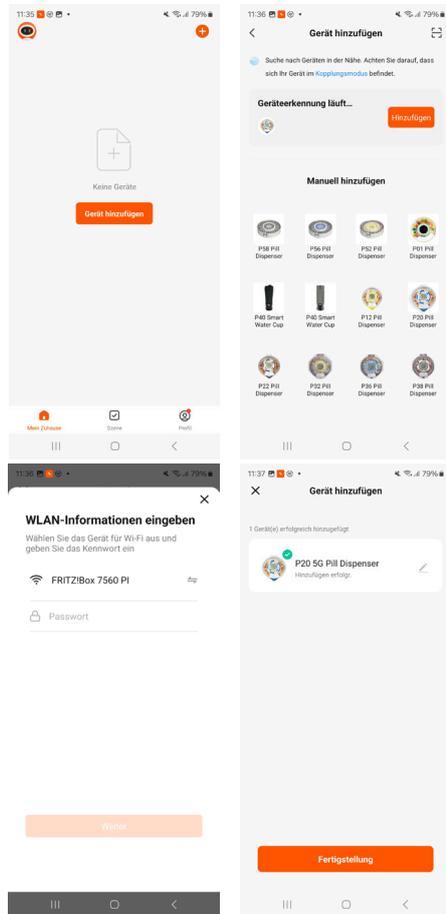

Es folgt der Begrüßungsbildschirm. Hier können Sie rechts oben den Stift anklicken, um dem Medikamentenspender einen neuen Namen zu geben. Unten können Sie das Dashboard, eine Aktivitäten-Liste, die Alarmeinrichtung und die Einstellungen aufrufen.





Dashboard: Bringt Sie immer wieder zurück auf die Hauptseite, auf der alle von Ihnen installierten Geräte angezeigt werden.

Aktivitäten: Zeigt Ihnen eine Aktivitäten Historie an. Die Einträge werden nach 14 Tagen gelöscht.

Alarmer: Zur Einrichten von Alarmen.

Wählen Sie zunächst die Anzahl der Alarmer zur Medikamenteneinnahme an. Auf dem folgenden Bildschirm können Sie die Uhrzeiten dazu festlegen, sowie eine Notiz bezüglich der Medikamente (z.B. Medikamentenname) speichern.

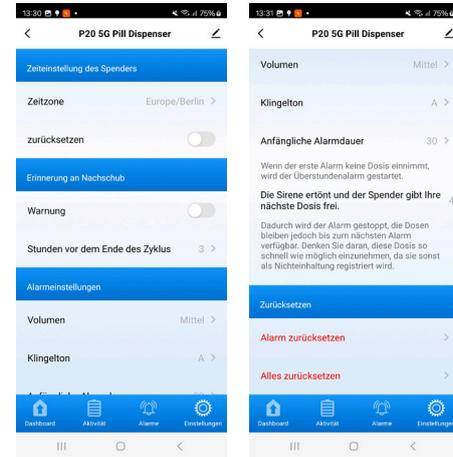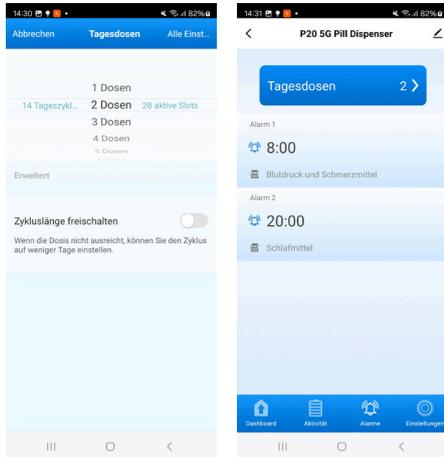

Einstellungen: Allgemeine Einstellungen des Medikamentenspenders ändern.

Hier können verschiedene Einstellung, wie z.B die Lautstärke des Alarms, Erinnerungen zum Auffüllen des Medikamentenspenders, oder ein komplette Zurücksetzen des Medikamentenspenders durchgeführt werden.

Reinigung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

Wasser, das in das Gehäuse eindringt, kann einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser ein.
- Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in das Gehäuse eindringt.

HINWEIS!

Gefahr durch Fehlbedienung!

Durch unsachgemäße Verwendung kann das Produkt beschädigt werden.

- Keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall oder Nylon-Borsten oder scharfe oder metallische Gegenstände wie Messer, harte Spachtel und ähnliches verwenden. Diese können die Oberfläche beschädigen.
- Das Produkt niemals in der Geschirrspülmaschine reinigen. Dadurch wird das Produkt zerstört.
 - Vor der Reinigung den Netzadapter abziehen.
 - Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
 - Das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen. Das Produkt vollständig trocknen lassen.

Aufbewahrung

Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, vom Netz trennen und an einem sauberen und trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Technische Daten

Modell:	SMD-1
Stromversorgung:	Netzadapter USB-C: 5,0V $\overline{\text{---}}$ 2,0A Batterie: 6,0V $\overline{\text{---}}$ (4x 1,5V), Typ LR6 (AA)
Schutzklasse:	III
Maximale WiFi Sendeleistung:	17 dBm
WLAN Standards:	IEEE 802.11a/b/g/n
WLAN Sicherheit:	WEP/WPA/WPA2/WPA2 PSK (AES) WPA3
Fachslot:	28 Slots
Maximale Ausgabezeit:	9 Mal pro Tag
Erinnerungstyp:	Stimme und blinkende Lichter
Erinnerungszeit:	Bis zu 9 Mal, 120 Minuten pro Mal
Bedienfeld:	Berührungstasten
Display:	TN-LCD (60 mm)
APP:	Android + iOS
Datenserver:	Idispenser
Abmessungen (L x B x H):	ca. 202 x 234 X 62 mm
Nettogewicht:	ca. 550g
Netzgerät	
Hersteller-Name:	ShenZhen Lv Xiang Yuan Technology Co.,Ltd.
Modell:	LX10B-050200E

Eingangsspannung: 100 - 240V ~, 50/60Hz, max. 0,35A
 Ausgang: 5,0V \equiv 2,0A, 10W
 Schutzklasse: II



Wir behalten uns das Recht auf technische und optische Änderungen am Produkt im Rahmen von Produktverbesserungen vor.

Hinweise zur EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH, dass der Funkanlagentyp „SMD-1“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://downloads.maginon.de/downloads/konformitaetserklaerung/>

supra Foto-Elektronik-Vertriebs GmbH
 Denisstraße 28 a, 67663 Kaiserslautern,
 Deutschland



Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Entsorgung des Geräts

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am

Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gleiche gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², sofern sie dauerhaft oder zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten. Ebenso rücknahmepflichtig sind

Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Gesamtlagerfläche von mindestens 800 m². Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantentlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

Elektro- und Elektronikgeräte der Informations- und Kommunikationstechnik, wie zum Beispiel Computer oder Smartphones, enthalten häufig personenbezogene Daten. Verbraucher sind selbst dafür verantwortlich, diese vor der Abgabe der Geräte zu löschen.

Verbraucher sind dazu angehalten, Maßnahmen zur Abfallvermeidung zu ergreifen. In Bezug auf Elektro- und Elektronikgeräte sind das eine Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können. Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich. Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen. Das Gerät verfügt über einen fest verbauten Akku. Dieser sollte vor Entsorgung des Produktes aus dem Produkt ausgebaut werden, um eine separate und umweltfreundliche Entsorgung zu gewährleisten. Aus Sicherheitsgründen muss der Ausbau unbedingt und ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Eine detaillierte Ausbauanleitung kann durch das qualifizierte Fachpersonal nach Verifizierung der Qualifikation unter der angegebenen Service Hotline angefordert werden. Batterien und Akkus bitte nur in entladem Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien. *) gekennzeichnet mit: Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

MAGINON

supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstr. 28 a, 67663 Kaiserslautern
Deutschland